

Promemoria

Per il corretto utilizzo del DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO



CECCHINI CUORE
www.cecchinicuore.org ONLUS
cecchinicuore@gmail.com

1 ACCENDI IL DAE



2 ATTACCA GLI ELETTRODI AL PAZIENTE COME DA FIGURA



3 NON TOCCARE IL PAZIENTE QUANDA IL DAE STUDIA IL RITMO



4a SE IL DAE DICE: "SCARICA CONSIGLIATA"

Non toccare il paziente
Premi il pulsante lampeggiante



5

DOPO LA SCARICA SEGUI LE ISTRUZIONI VOCALI




100 COMPRESSIONI
AL MINUTO

**SE IL DAE NON
CHIEDE LA SCARICA**



6 Se la vittima riprende a respirare
METTI LA IN QUESTA POSIZIONE

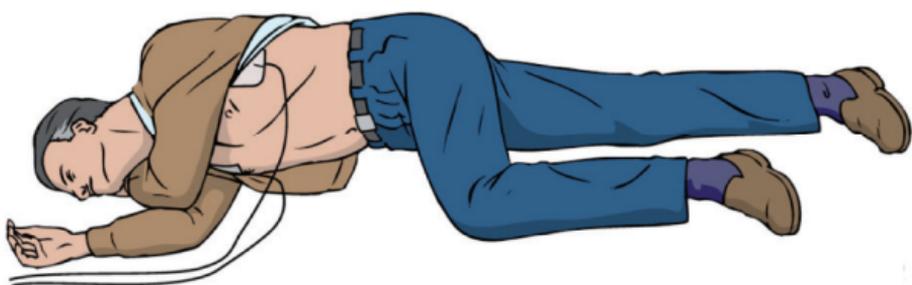

NEL BAMBINO

Iniziare la rianimazione
con 2 ventilazioni,
seguite da
30 compressioni

DEFIBRILLAZIONE NEL BAMBINO

- Se ha piu' di 8 anni usa le
piastre dell'adulto
- Al di sotto di 8 anni usa le
piastre pediatriche, ma se
non ne disponi, USA
QUELLE DELL'ADULTO

